


ThinPrep® Instructies voor het Maken van Pap Test Monsters




Protocol voor de Cervex-Brush bij de ThinPrep Pap Test

- Zet alles klaar alvorens aan de procedure te beginnen.
- Controleer de uiterste gebruiksdatum op het potje.
- Controleer of de complete plastic verzegeling van het dekseltje van het potje verwijderd is en weggegooid.
- Vul de patiëntgegevens op zowel het aanvraagformulier als het potje volledig in. Als er gegevens missen op het potje bestaat de kans dat het monster wordt teruggestuurd.
- Verwijder voor het nemen van het monster het dekseltje van het potje.
- Gebruik geen glijmiddel omdat dat invloed kan hebben op het ThinPrep Pap Test proces.

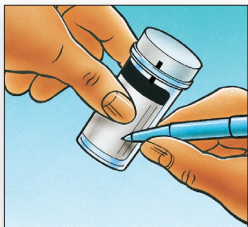

Noteer

De volledige naam en geboortedatum van de patiënt.
De patiëntgegevens en medische geschiedenis op het aanvraagformulier van cytologie.

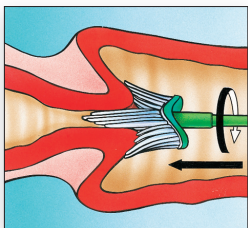


Neem

Een toereikend monster van de baarmoederhals met de Cervex Brush (groen bezemachtig instrument). Breng het middelste gedeelte van de borstel diep genoeg in het baarmoederhalskanaal, zodat de kortere borstelhaartjes volledig in contact komen met de baarmoedermond.


Duw voorzichtig en draai de borstel* vijf keer met de klok mee.

*De haren van de brush zijn "D" vormig.

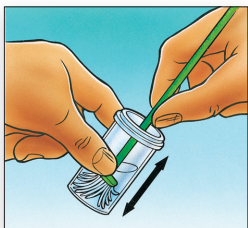

Spoel

De Cervex Brush ONMIDDELLIJK uit in het PreservCyt® Solutionpotje door hem 10 keer krachtig tegen de bodem aan te drukken waardoor de borstelhaartjes uit elkaar gaan staan. Draai tenslotte de borstel enkele keren goed rond in het potje om de laatste restjes materiaal los te krijgen. Kijk daarna goed naar de Cervex Brush om er zeker van te zijn dat geen materiaal op de borstel is achtergebleven. Gooi het verzamelgedeelte van het instrument weg. Laat de kop van de Cervex Brush niet achter in het potje.

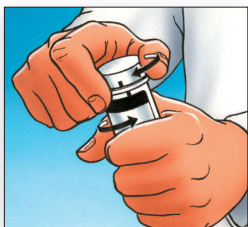

Vastdraaien

Van het dekseltje zodat de zwarte markering op het dekseltje die op het potje passeert. Niet te strak vastdraaien.



Doe

Het potje samen met het aanvraagformulier in de monsterzak voor vervoer naar het lab.

Veel Gestelde Vragen

Wat moet ik doen als het potje omver gestoten is?

Als het potje omver wordt gestoten na het nemen van een monster, kijk dan of er nog voldoende vloeistof in het potje aanwezig is. Als er nog ongeveer eenderde van de vloeistof in het potje achter is gebleven kan het potje alsnog naar het lab gestuurd worden om verwerkt te worden. Maak middels een aantekening op het aanvraagformulier melding van het morsen met het monster. Vul het potje niet aan met vloeistof uit een ander potje; het lab zal zo nodig het vloeistofniveau aanpassen.

Kan ik een ThinPrep monster nemen als de patiënt ongesteld is?

Nee. Het nemen van monsters tijdens de menstruatie dient vermeden te worden.

Kan ik de Cervex Brush gebruiken bij vernauwing van de baarmoedermond?

In dit geval kan nog steeds de Cervex Brush gebruikt worden, hoewel de arts vrij is te kiezen voor een endocervicale borstel. Beide borstels dienen uitgespoeld te worden in hetzelfde potje.

Kan ik de Cervex Brush gebruiken om uitstrijkjes uit de fornix te nemen?

De Cervex Brush kan gebruikt worden om monsters uit de fornix te nemen door middel van het maken van een vegende beweging.

Kan ik de Cervex Brush gebruiken als er sprake is van een groot ectropion gebied?

De Cervex Brush kan gebruikt worden als er een groot ectropion gebied is. Het monster dient genomen te worden met een ronddraaiende vegende beweging.

Kan ik glijmiddel gebruiken?

Gebruik geen glijmiddel omdat dat invloed kan hebben op het ThinPrep Pap Test proces.

Moet ik een apart monster maken voor het testen van HPV?

Nee. De HPV-test kan worden uitgevoerd op hetzelfde materiaal dat verzameld is voor de ThinPrep Pap Test, of indien anders aangegeven door het laboratorium.

Wel doen

- Als er teveel slijm aanwezig is dient dat voorzichtig weggehaald te worden voordat het monster genomen wordt.
- Gebruik ofwel alleen de Cervex Brush (bezemachtig instrument), ofwel een plastic spatel samen met een endocervicale borstel.
- De Cervex Brush dient 5 MAAL met de klok mee rondgedraaid te worden. De plastic spatel dient 360 graden rondgedraaid te worden en de endocervicale borstel een kwart tot een halve draai.
- Spoel het verzamelde materiaal meteen uit in het potje.
- Plaats het dekseltje op het potje en draai het zodanig vast dat de zwarte markeringsstreep op het dekseltje die op het potje passeert om morsen te voorkomen.
- Plak niets op het ongelabelde gedeelte van het potje zodat de inhoud zichtbaar blijft.
- Als labels met streepjescodes worden gebruikt dienen deze horizontaal om het potje aangebracht te worden.
- Monsters dienen zonder vertraging naar het lab gezonden te worden.

Niet doen

- Maak de baarmoederhals niet stelselmatig schoon en maak geen uitstrijkje van de baarmoederhals alvorens een monster te nemen.
- GEBRUIK NOOIT alleen een endocervicale borstel.
- GEBRUIK NOOIT een houten spatel.
- GEBRUIK GEEN glijmiddel*.
- Laat het verzamelinstrument NIET in het potje staan terwijl u met de patiënt bezig bent.
- Draai het dekseltje NIET te strak op het potje.
- Laat de kop van de Cervex Brush NIET achter in het potje.
- Plak NOOIT meer dan één label op het potje
- Plak de labels met streepjescodes NIET verticaal op het potje.
- Plak de labels NIET op het venster.
- GEBRUIK geen potjes waarvan de uiterste gebruiksdatum verstreken is.
- Stel het verzenden van de potjes naar het lab NIET uit.

HOLOGIC®

Hologic Netherlands b.v.
 Transistorstraat 60
 1322 CG Almere
 The Netherlands
 Tel: +31 36 7111186
 Email: Benelux@hologic.com

GBR-07-027-NL-F. ©2013 Hologic, Inc. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hologic, ThinPrep, PreservCyt en bijbehorende logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Hologic, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve rechthebbenden. Deze informatie is bedoeld voor medische beroepsbeoefenaren in de VS en andere markten en is niet bedoeld als onderzoek om het product te gebruiken of als reclamecampagne daar waar dergelijke activiteiten verboden zijn. Aangezien Hologic-materiaal via websites, eBroadcasts en jaarbeurzen wordt gedistribueerd, is het niet altijd mogelijk te bepalen waar dergelijk materiaal verschijnt. Voor specifieke informatie over welke producten in een bepaald land voor verkoop beschikbaar zijn, neemt u contact op met uw plaatselijke Hologic-vertegenwoordiger of schrijft u naar womenshealth@hologic.com.